

Cureta dermatológica estéril Blayco

> Descripción del producto

El dispositivo se utiliza para raspar lesiones de la superficie de la piel.



CE
2460

> Características del producto

- Producto estéril por irradiación Gamma.
- Caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación.



> Especificaciones técnicas

> Materiales

- Punta: Acero inoxidable
- Mango: ABS
- Tapón: LDPE
- Envase primario: Grado médico

> Principales propiedades dimensionales

- DCS20 : 2 mm de diámetro.
- DCS30: 3 mm de diámetro.
- DCS40: 4 mm de diámetro.
- DCS50: 5 mm de diámetro.
- DCS70: 7 mm de diámetro.

> Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: no citotóxico.
- ISO 10993-4: Hemocompatible.
- ISO 10993-10: no sensibilizante a la piel.
- ISO 10993-10: irritación intracutánea negativo.

Conclusión: producto biocompatible.

> Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Limitación de temperatura: 10°C - 40°C.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.

> Presentación

| # | Ref | Presentación |
|-------|--------|--|
| DSC20 | DCS2.0 | Bolsa unitaria, en estuche de 10 unidades. |
| DCS30 | DCS3.0 | Bolsa unitaria, en estuche de 10 unidades. |
| DCS40 | DCS4.0 | Bolsa unitaria, en estuche de 10 unidades. |
| DCS50 | DCS5.0 | Bolsa unitaria, en estuche de 10 unidades. |
| DCS70 | DCS7.0 | Bolsa unitaria, en estuche de 10 unidades. |

> Instrucciones de uso

- Seleccionar el tipo y tamaño adecuados de la cureta según el área del cuerpo y tamaño de la lesión a intervenir.
- Comprobar que la fecha de caducidad en la caja no esté superada y extraer una bolsa.
- Retirar el dispositivo de la bolsa individual.
- Limpiar el área a intervenir con un desinfectante adecuado.
- Para realizar el tratamiento, sujetar la cureta entre los dedos pulgar índice y medio, estirando la piel a la vez con los dedos de la otra mano.
- Este método de sujeción permite un guiado preciso del dispositivo, para que el trozo de tejido se pueda extraer con una incisión bien dirigida.

Fecha: Febrero 2023

Nº Especificación: ETP/369/00

> Información reglamentaria

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple la Directiva 93/42/EEC y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad certificado como **ISO 13485**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase IIa** según el Anexo IX de la Directiva 93/42/EEC, regla 6.
- Código GMDN: 63259.