

Gel anticelulítico para cavitación

Uman

> Descripción del producto

El gel anticelulítico para cavitación Uman contiene una combinación de extractos de café, guaraná, té verde, cola y castaño de indias, todos ellos reconocidos activos anticelulíticos, que potencian el tratamiento por cavitación de los depósitos de grasa.



> Características del producto

- La base acuosa del gel, permite que pueda utilizarse como gel conductor en tratamientos de cavitación.

> Especificaciones técnicas

> Composición (INCI)

Aqua (Water), Glycerin, PEG-8, Butylene Glycol, Polysorbate-20, Aesculus Hippocastanum Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Chenopodium Quinoa Seed Extract, Coffea Robusta Seed Extract, Paullinia Cupana Seed Extract, Cola Acuminata Seed Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Carbomer, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Parfum, Caprylyl Glycol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate.
CI 19140, CI 14720.

> Propiedades físico-químicas

- Color, Olor, Aspecto: Gel viscoso transparente, de color naranja-marrón. Olor característico a su perfume.
- Viscosidad: > 700.000cps.
- pH: 5,0 - 6,0.
- Densidad: 1,01 – 1,03 g/mL.

> Propiedades microbiológicas

- Aerobios totales: <100 ufc/mL.
- Mohos y levaduras: <100 ufc/mL.
- Patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli): Ausencia.

> PAO y fecha de caducidad

- Periodo después de la apertura (PAO): 12 meses tras la apertura.
- Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

> Presentación

#	Presentación
TBT02	Botella de HDPE blanco de 1000 mL con bomba dosificadora.
TBT03	Garrafa de HDPE natural de 5000 mL con bomba dosificadora.

> Instrucciones de uso

> Indicaciones

- Indicado para tratamientos anticelulíticos.
- Se aplicará en las zonas del cuerpo afectadas por celulitis después del aseo, ducha o baño, o bien antes del tratamiento por cavitación.
- Está indicado para todo tipo de pieles.

> Advertencias

- Sólo para uso externo.
- Evítese el contacto con los ojos, mucosas y heridas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

Fecha: Enero 2024

Nº Especificación: ETP/224/5

> Información reglamentaria

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple con el **Reglamento Europeo 1223/2009 de Productos Cosméticos** y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad basado en la **ISO 22716**.

Registro CPNP: 2384849