


Rotulador quirúrgico Blayco

> Descripción del producto

El rotulador dermatográfico es un producto sanitario utilizado para marcar la piel del paciente antes o durante una intervención quirúrgica.

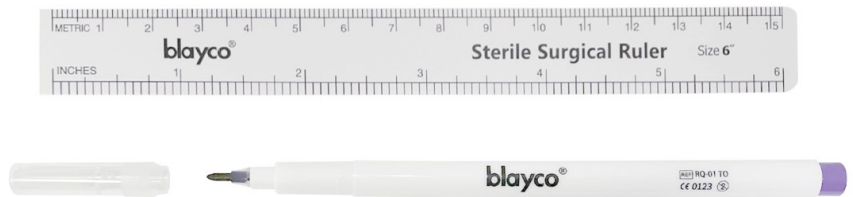

> Características del producto

- Color de la tinta: violeta genciana
- Disolventes de la tinta: alcohol isopropílico y agua
- Grosor marcador:
 - TCH02TO: punta estándar 1 mm
 - TCH05TO: doble punta (una estándar 1 mm y una fina 0.5 mm).

> Especificaciones técnicas

> Materiales

- Cuerpo: Polipropileno
- Tapón y cubierta: Polipropileno
- Regla: PVC
- Plumilla: Fibra sintética
- Tinta: Violeta genciana (nº CAS 548-62-9)
- Bolsa: PET / PE film y papel esterilizable.

> Principales propiedades dimensionales

- Longitud rotulador (incluyendo tapón): 16.5cm (referencia TCH2TO)
- Longitud rotulador (incluyendo tapone):14cm (referencia TCH5TO)
- Longitud regla PVC: 15cm

> Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: no citotóxico
- ISO 10993-10: no sensibilizante a la piel
- ISO 10993-10: irritación intracutánea negativo

Conclusión: producto biocompatible

> Esterilización y caducidad

- Estéril mediante radiación gamma
- Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación

> Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Limitación de temperatura: < 40°C.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.

> Presentación

#	Ref	Presentación
TCH02TO	RQ-01 TO	Bolsa unitaria con regla. Producto estéril. Caja de servicio 100 unidades.
TCH05TO	RQ-05 TO	Bolsa unitaria con regla. Producto estéril. Caja de servicio 100 unidades.

> Instrucciones de uso

- Limpiar y secar la piel del paciente (No utilizar sobre piel húmeda).
- Marcar la piel.
- Usar yoduro para desinfectar la piel y repasar el marcador.
- Utilizar alcohol al 75% para desinfectar la piel y realizar el procedimiento.
- Retirar la marca de la piel con alcohol, si es necesario.

Fecha: Enero 2023

Nº Especificación: ETP/366/00

> Información reglamentaria

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple la Directiva 93/42/EEC y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad certificado como **ISO 13485**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase I Estéril** según el Anexo IX de la Directiva 93/42/EEC, regla 1.
- Código EMDN: (V9004) Skin Markers.