



DORMO COLD/HOT

Bolsa reutilizable para frío/calor

TTG00: bolsa pequeña, FC-02

TTG01: bolsa grande, FC-01

Fecha

Julio 2021

Nº Especificación

ETP/221/06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales

- Bolsa: film de plástico OPA/PET
- Contenido: gel azul viscoso, base acuosa

Principales propiedades dimensionales

- FC-01: 130mm x 260mm
- FC-02: 130mm x 180mm

Presentación

- FC-01: caja de 20 unidades
- FC-02: caja de 20 unidades



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedades

- Apto para uso en frío o en caliente
- No queda rígida al congelar
- Conserva la viscosidad en caliente
- Se puede conservar indefinidamente en el congelador hasta el siguiente uso
- No aplicar directamente sobre la piel: usar envuelta en una toalla seca o en una funda adecuada antes de utilizar

Uso en frío

Tratamiento con efecto frío:

- El producto con efecto frío ayuda a disminuir la inflamación y el dolor. Se usa para tratar:
 - Hinchazones
 - Lesiones agudas (hematomas y contusiones)
 - Lesiones musculares o articulares
 - Fiebre (no está diseñada para bajar la temperatura corporal)

Preparación:

- Introducir la bolsa en el congelador durante 1 o 2 horas.
- Retirar la bolsa del congelador y envolver en la funda reutilizable o en una toalla seca.
- Aplicar sobre la zona afectada.
- La bolsa puede volver a almacenarse en el congelador.
-

Uso en caliente

Tratamiento con efecto calor:

- El producto con efecto calor ayuda a reducir el dolor muscular y articular. También es adecuado para lumbalgias, tortícolis, reumatismo e hipotermia. Se usa para tratar:
 - Dolor de hombro o cuello



-
- Sensación de frío (se usa como calentador)
 - Para aliviar la tensión muscular del dolor de estómago

Preparación:

Baño maría:

- Calentar un recipiente con agua hasta ebullición.
- Retirar del fuego.
- Sumergir la bolsa en el agua caliente de 5 a 10 minutos.
- Retirar la bolsa del agua y envolver en la funda reutilizable o en una toalla seca
- Aplicar sobre la zona afectada.

Microondas:

- Sumergir la bolsa completamente en un recipiente adecuado para el microondas con agua.
- Calentar en intervalos de 30 segundos a potencia máxima (800-900W) hasta alcanzar la temperatura deseada.
- Retirar la bolsa del agua y envolver en la funda reutilizable o en una toalla seca.
- Aplicar sobre la zona afectada.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple del Reglamento (UE) 2017/745 y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad certificado como **ISO 13485**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase I – no estéril** según el Anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745, Regla 1.
- Código GMDN: 37240 Bolsa para terapia Frío/Calor reutilizable
- Código EMDN: V9099 (Varios dispositivos, no incluidos en otras clases-otros).