



Produit

DORMO COLD/HOT

Poche réutilisable pour froid/chaud

Références

TTG00 : poche petite, FC-02

TTG01 : poche grande, FC-01



Date

Juillet 2021

N. Spécification

ETP/221/06

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux

- Poche : film plastique OPA/PET
- Contenu : gel bleu visqueux, base aqueuse

Principales propriétés dimensionnelles

- FC-01 : 130mm x 260mm
- FC-02 : 130mm x 180mm

Conditionnement

- FC-01 : carton d'emballage de 20 unités
- FC-02 : carton d'emballage de 20 unités



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriétés

- Apte pour un usage à froid ou à chaud.
- Ne devient pas rigide à la congélation.
- Conserve la viscosité à chaud.
- Peut se conserver indéfiniment au congélateur jusqu'à l'usage suivant.
- Eviter d'appliquer la poche directement sur la peau : enrroulez-la dans une serviette sèche et propre o une housse de protection.

Usage à froid

Traitement à effet froid :

- Le produit à effet froid contribue à réduire l'inflammation et la douleur. Il est utilis pour traiter :
 - Les gonflements
 - Les lésions aiguës (hématomes et contusions)
 - Les lésions musculaires ou articulaires
 - La fièvre (il n'est pas conçu pour faire baisser la température corporelle)

Préparation :

- Placer la poche dans le congélateur pendant 1 ou 2 heures.
- Sortir la poche du congélateur et l'envelopper dans la housse réutilisable ou une serviette sèche.
- L'appliquer sur la zone concernée.
- La poche peut être de nouveau stockée dans le congélateur.



Usage à chaud

Le produit à effet chaud aide à soulager la douleur musculaire et articulaire. Il est également approprié pour les lombalgies, les torticolis, le rhumatisme et l'hypothermie. Il est utilisé pour traiter :

- La douleur de l'épaule ou du cou
- La sensation de froid (il peut être utilisé pour réchauffer)
- Pour soulager la tension musculaire de la douleur d'estomac.

Préparation :

Bain-marie :

- Porter à ébullition de l'eau dans un récipient.
- Le retirer du feu.
- Plonger la poche dans l'eau chaude de 5 à 10 minutes.
- Retirer la poche de l'eau et l'envelopper dans la housse réutilisable ou une serviette sèche.
- L'appliquer sur la zone concernée.

Micro-ondes:

- Plonger la poche entièrement dans un récipient rempli d'eau allant au micro-ondes.
- Chauffer par intervalles de 30 secondes à la puissance maximale (800-900 W) jusqu'à atteindre la
- température souhaitée.
- Retirer la poche de l'eau et l'envelopper dans la housse réutilisable ou une serviette sèche.
- L'appliquer sur la zone concernée.

INFORMATION REGLEMENTAIRE

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises et **Règlement (UE) 2017/745** et qu'il est fabriqué, selon la normative du Système de Qualité certifié comme **ISO 13485**.

Ce produit se classifie comme :

- Produit de **Classe I –non stérile** selon l'Annexe VIII et **Règlement (UE) 2017/745**, règle 1.
- Code GMDN :37240 Pack de thérapie à chaud / froid, réutilisable.
- Code EMDN :V9099 (Divers- Dispositifs et accessoires non classifiés).